

差し込みによる封

製品例 オオサキ薬液綿棒 ポビドン10% 1015-2(30袋)

未開封の確認方法 および 正しい開封方法について

1 未開封の状態



差し込み口(未開封)



ミシン目(未開封)



下記の状態になっているかをご確認ください。

- 差し込み口が空いていない。
- ミシン目が切れていない。
- 箱全体に不自然な破れ等がない。

2 開封方法



- 「PUSH」の部分から押し開けて、開封する。

3 開封後の状態




⚠ 以下の場合、すでに開封されている可能性があります

⚠ ミシン目が切れている



⚠ 差し込み口が破れている

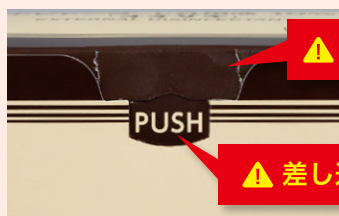

⚠ 差し込み口が空いている