

一般医療機器

滅菌処置用眼帯

貼る眼帯



看護・介護製品

眼科用品

E.O.G.



耳ひものストレスがない
貼るだけで使用できる眼帯です。



看護・介護製品

眼科用品

E.O.G.

商品特長

1 ひもがなく貼るだけ

- ひもがないためストレスが少なく、貼るだけで簡単に使用できます。
- 貼ったままでメガネをかけることができます。



2 目まわりにフィットする楕円形状!

- 楕円形状のため、目まわりにぴったりとフィットします。

3 眉毛に貼りつかない

- パッド上部には粘着テープが付いていないため、眉毛に貼りつくことはありません。

4 滅菌処理で清潔

- 術後の目にも清潔に使用できる、1枚個包装の滅菌済眼帯です。

5 肌にやさしい粘着剤


- 肌にやさしいアクリル系粘着剤を使用しています。

商品情報


■使用方法




1 清浄綿などで目のまわりを拭き、清潔にします。

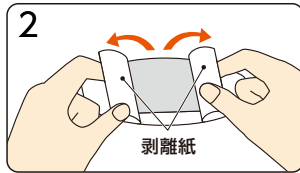

2 粘着面やパッド部に手が触れないように注意して、剥離紙を開きます。

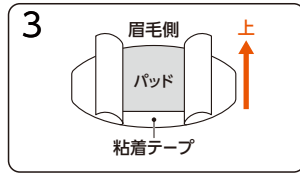


3 粘着テープが付いていない方を上(眉毛側)にします。

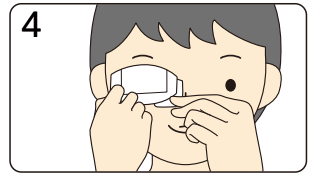

4 パッド部が眼を覆うように当て、剥離紙を剥がしながら貼ります。

■規格

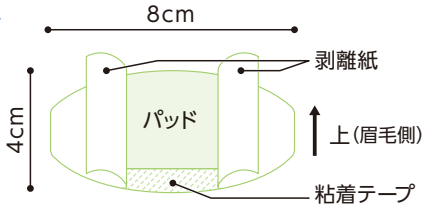

■成分

粘着テープ: ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
パッド: ポリエチレンネット状フィルム両面付脱脂綿

関連商品



医薬部外品

クリーンコットンアイ
ツインパウチ 1枚入

■販売名: クリーンコットンアイTP1

- 点眼前後に1枚ずつ衛生的に使用できるツインパウチ包装の目まわり用清浄綿です。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
73311	オオサキ 貼る眼帯 フリー 1枚入(10袋) シール部8cm×4cm パッド部4.5cm×3.2cm	販売単位 95 × 150 × 20	37.0g	10個 × 12箱	ハルカ・ンタイ F 10P	4971032733111
		内装 220 × 155 × 97.5	425.0g		4 971032 733111	24971032733115
		外装 480 × 245 × 405	5.8kg		—	—
73312	オオサキ 貼る眼帯 フリー 1枚入(50袋) シール部8cm×4cm パッド部4.5cm×3.2cm	販売単位 92 × 127 × 80	136.0g	6個 × 10箱	ハルカ・ンタイ F 50P	4971032733128
		内装 246 × 132 × 188	900.0g		4 971032 733128	24971032733122
		外装 675 × 270 × 390	9.9kg		—	—

■販売名: オオサキ 貼る眼帯 ■届出番号: 23B2X10001000105

◇商品はずべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。